

●●●● PACT<sup>®</sup>400

## Photo-aktivierte Therapie



Heilt Zahn-, Mund-,  
Kiefer- und  
Implantatentzündungen.

Ohne Nebenwirkungen!

# Information zur Photo-aktivierten Therapie (PACT® 400)

PACT® ist ein wissenschaftlicher Begriff für die Photodynamische Antimikrobielle Therapie. Mit dieser Methode können krankmachende Bakterien sehr effektiv, sehr schonend, schmerzfrei ohne Nebenwirkungen abgetötet werden.

## Schritt 1 (60 Sekunden):

Ein blaues Farbstoffgel wird auf die entzündeten Bereiche aufgetragen bzw. in den Zahn/Implantat eingebracht. Bakterien und Pilze nehmen diesen schnell auf, Körperzellen werden geschont. So markieren sich die entzündungsverursachenden Keime selektiv für das PACT®-Laserlicht.

## Schritt 2 (20 Sekunden):

Die mit dem blauen Farbstoff angefärbten Bakterien oder Pilze werden durch Bestrahlung mit PACT®-Laserlicht sehr wirksam abgetötet. Die Abtötungsrate liegt bei 99,99 %, Resistenzen gibt es nicht. Die PACT® Wirkung geht tief in das Gewebe hinein, ist völlig schmerzfrei und schont die menschlichen Zellen. PACT® kann den Einsatz von Antibiotika ersetzen. Die Blaufärbung verschwindet nach wenigen Minuten von ganz alleine.

## Die PACT® Heilung: Gesundes Gewebe kann wachsen.


Nachdem die Bakterien abgetötet wurden, kann der Körper die Entzündung ausheilen. Schleimhaut und Zahnfleisch können gesund nachwachsen. Erkrankte Zähne/Implantate können heilen. Die Behandlung kann jederzeit nebenwirkungsfrei wiederholt werden.



# Photo-aktivierten Therapie (PACT®400)

(Betreffendes bitte ankreuzen)

- **PACT® Parodontitis-Therapie**  
Schmerzfreie Alternative zur Kürettage, Antibiose und Operation. Verbessert die Regeneration.
- **PACT® Therapie von Implantatentzündungen**  
Führt rasch zur Entzündungsfreiheit und schont die empfindlichen Implantatoberflächen.
- **PACT® Wurzelkanal-»Sterilisation«**  
Eliminiert Problemkeime aus dem Wurzelkanalsystem. Verbessert den Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung.
- **PACT® Karies-Therapie**  
Minimiert das zahnärztliche Bohren. Wirkt bis tief ins poröse Zahnbein. Schont die Zahnerven.
- **PACT® Knochen- und Weichgewebs-Therapie. Auch bei Herpes, Aphten etc.**  
Wirkt schnell und schmerzfrei, beschleunigt die Heilung, hilft Operationen zu vermeiden.

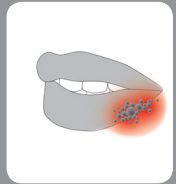

**Cumdente GmbH**  
Paul-Ehrlich-Straße 11  
72076 Tübingen, Germany  
[www.cumdente.de](http://www.cumdente.de)

Überreicht von Ihrem Zahnarzt:



Weitere Informationen  
erhalten Sie von Ihrem  
Zahnarzt.

Stand: Januar 2019

Praxisstempel

