

»FAQ«

Warum werden für die Reinigung im Wurzelkanal seitlich angeschliffene Spülkanülen verwendet?

Zur Wurzelkanalspülung (z. B. mit NaOCl) bzw. zur Konditionierung mit Zitronensäure (z. B. Cumdente Root Canal Conditioner) werden stumpfe Metallkanülen mit endständigem seitlichem Anschliff (z. B. Cumdente Endo-Einweg-Spülkanüle) empfohlen. Der seitliche Anschliff vermeidet eine Verblockung im Wurzelkanal sowie einen erhöhten Flüssigkeitsdruck und infolgedessen ein Überfüllen auf den Apex/Periapex. Intra- und postoperative Beschwerden durch Überpressen der Spüllösung werden vermieden.

Seitlich angeschliffene Spülkanülen werden dabei nicht nur in der manuellen Spülung eingesetzt, sondern z. B. auch bei automatischen, hydrodynamischen Spülsystemen (z. B. Dürr Dental RinsEndo). Die RinsEndo Druck-Saug-Spülung führt zu einer noch effektiveren Reinigung des Wurzelkanals. Im Gegensatz zur manuellen Spülung genügt es bei diesem System, die dazugehörige Spülkanüle (Dürr Dental RinsEndo Kanülen Set) ins koronale Kanaldrittel einzuführen. Die RinsEndo Spülkanüle verfügt ebenfalls über einen endständigen seitlichen Anschliff um einen zu hohen Flüssigkeitsdruck auf den Apex/Periapex zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>
Mit besten Grüßen aus Tübingen

Cumdente.
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21
Fax +49 70 71 975 57 22
info@cumdente.de
www.cumdente.com