

## »FAQ«

### Wie lässt sich am Einfachsten ein Portlandzement (z.B. Cumdente, MTA rapid) apikal einbringen?

---

Ein Portlandzement wird zur Überkappung vitaler Pulpen, zum Verschluss von Perforationen sowie als Versiegelungsmaterial für apikal eröffnete Wurzelkanäle eingesetzt.

Der MTA Zement (z.B. Cumdente, MTA rapid) wird aus Pulver und Flüssigkeit zu einer festen, schollenartigen Konsistenz angemischt. Ein Stück MTA rapid Zement wird mit einem Spatel aufgenommen und am Kanaleingang platziert. Die Applikation und Kondensation in die Tiefe gelingt am Besten auf einem längenmarkierten Plugger, der 2 mm kürzer als die ursprüngliche Arbeitslänge eingestellt wird, um einen apikalen Verschluss mit MTA rapid Zement von ca. 2 mm Länge zu erhalten.

Da das Anmischen des etwas bröseligen Materials zu einer festen Konsistenz bisher oft Schwierigkeiten verursachte, gibt es den MTA rapid Zement nun endlich in praktischen Dentalkapseln (z.B. Cumdente, MTA-Universal DirectCaps). Die Kapseln werden nach Aktivierung mit einem handelsüblichen Kapselmischgerät für 30 Sekunden gemischt. Es entsteht ein homogener geschmeidig-stopfbarer endodontischer Reparaturzement, der nun mit einem universellen Handapplikator für alle gängigen Dentalkapseln (z.B. Cumdente, CAP-Applikator) appliziert werden kann.

---

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>  
Mit besten Grüßen aus Tübingen

**Cumdente.**  
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland  
Paul-Ehrlich-Straße 11  
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21  
Fax +49 70 71 975 57 22  
[info@cumdente.de](mailto:info@cumdente.de)  
[www.cumdente.com](http://www.cumdente.com)