

»FAQ«

Gibt es Parallelisierungshilfen zum Inserieren der ClickVX Implants?

Bei zwei oder mehreren nebeneinander zu inserierenden Implantaten wird empfohlen diese möglichst parallel zu inserieren. Hierzu gibt es diverse Parallelisierungshilfen auf dem Markt. Eine sehr einfache und kostengünstige Möglichkeit ist die Verwendung von sogenannten Orientierungspfosten (z.B. Cumdente Positioning Guide 1.8 und 2.2).

Der Cumdente Positioning Guide aus Titan medical Grade 5 kann mittels Zahnseide gesichert und in den zuvor präparierten Bohrtollen eingebracht werden. Nun kann im Anschluss eine zweite Implantatbohrung, parallel zur ersten Bohrung, durchgeführt werden.

Übrigens:

Bei Verwendung der Cumdente Click^{VX} Implants ist eine geringe Pfeilerdivergenz möglich. Die genaue Pfeilerdivergenz hängt von den verwendeten Retentionseinsätzen und von der Distanz der Implantate ab. Bei Verwendung von Einsätzen mit mittlerer Abzugskraft (Aktiv-Retainer Medium, ca. 1.500 – 2000 g Haltekraft) und bei unmittelbarer Nachbarschaft zweier Click^{VX} Implants sollte die Divergenz nicht größer als 8° sein. Bei weiterer Entfernung (z.B. Gegenseite) sollte die Divergenz maximal 20° betragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>
Mit besten Grüßen aus Tübingen

Cumdente.
dental concepts

Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21
Fax +49 70 71 975 57 22
info@cumdente.de
www.cumdente.com