

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die »Frage des Monats« soll eine interessante Frage einer Kollegin/eines Kollegen besprechen, die für jeden von uns von besonderer Relevanz für die tägliche Praxis ist.

»Frage des Monats« an das Cumdente-Team:

Verwenden Sie aufgrund der blutstillenden Wirkung von Cumdente Etch & Bond dieses auch zur Abdeckung von eröffneten Pulpen?

Nein, Etch & Bond wird nicht zur Blutstillung von eröffneten Pulpen empfohlen. Zur Abdeckung einer eröffneten Pulpa empfehlen wir die Verwendung von MTA Zement (Mineral Trioxide Aggregate).

z.B.

- Cumdente MTA rapid,
- Cumdente MTA Universal Direct Caps oder
- Cumdente MTA Speed

Der MTA Zement wird dabei direkt auf die eröffnete Pulpa aufgebracht.

Die Anwendungsgebiete von Cumdente Etch & Bond sind wie folgt:

- Selbstätzendes, licht- und selbsthärtendes Schmelz- und Dentinadhäsiv in der Füllungstherapie,
- zur Desensibilisierung von freiliegenden Dentinoberflächen (z.B. freiliegende zervikale Flächen),
- selbstätzendes, licht- und selbsthärtendes Adhäsiv im Wurzelkanal
(in Verbindung mit einem adhäsiven Wurzelfüllmaterial wie z.B. Seal 3D)
- Infiltrant in Verbindung mit einer chemischen Präparation (Salzsäuregel)

Wenn es hier während der Anwendungen zu Blutungen der Gingiva kommt, ist der zusätzliche Effekt der blutstillenden Wirkung sehr vorteilhaft.

Ja, ich möchte ab sofort regelmäßig die »Frage des Monats« von Cumdente kostenlos an die folgende E-Mail Adresse erhalten:

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Rückfax an die +49 70 71 975 57 22

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>

Mit besten Grüßen aus Tübingen

Ihr Prof. Dr. Rainer Hahn