

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die »Frage des Monats« soll eine interessante Frage einer Kollegin/eines Kollegen besprechen, die für jeden von uns von besonderer Relevanz für die tägliche Praxis ist.

»Frage des Monats« an das Cumdente-Team:

Wie sind die Indikationsunterschiede zur Verwendung von Cumdente Xpand ApaUniversal Cement, Cumdente Prime & Cem und Cumdente Zirkon-Adhaesiv-Cement?

Xpand Zemente und **Prime & Cem** weisen eine gesteuerte Volumenexpansion auf, die bereits parallel mit der Aushärtung einsetzt. Die Xpand Zemente und Prime & Cem weisen auch ohne Schmelz- und Dentin-Adhäsive ausgezeichnete Haftwerte am Zahnstumpf und an Restaurationen aus Kunststoffen, Metalllegierungen und allen Dentalkeramiken auf. Zusätzlich können die Haftwerte mit Etch & Bond bzw. Metall / Zirkon Primer II verbessert werden.

Indikationen: Selbst-adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Teilkronen und Brücken aus allen Dentalmaterialien, Legierungen sowie Keramiken (auch Zirkonoxidkeramik).

Zirkon-Adhaesiv-Cement ist ein selbsthärtendes Komposit für die selbst-adhäsive Zementierung/Reparatur von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Restaurationen aus Zirkonoxid, Edelmetall, Nicht-Edelmetall und Keramik. Für einen dauerhaften und sicheren Verbund steht zusätzlich der speziell abgestimmte Zirkon Primer II zur Verfügung.

Indikationen: Intra-orale (adhäsives Zementieren, Reparaturen, etc.) und extra-orale zahntechnische Anwendung (z.B. Verbinden von Titan-Klebebasen mit individuellen Abutments aus Zirkonoxid, Suprakonstruktionen auf Abutments etc.). Cave: Nicht als Befestigungszement auf Zahnstümpfen verwenden!

Ja, ich möchte ab sofort regelmäßig die »Frage des Monats« von Cumdente kostenlos an die folgende E-Mail Adresse erhalten:

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Rückfax an die +49 7071 9755722

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>
Mit besten Grüßen aus Tübingen

Ihr Prof. Dr. Rainer Hahn

Cumdente.
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21
Fax +49 70 71 975 57 22
info@cumdente.de
www.cumdente.com