

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die »Frage des Monats« soll eine interessante Frage einer Kollegin/eines Kollegen besprechen, die für jeden von uns von besonderer Relevanz für die tägliche Praxis ist.

»Frage des Monats« an das Cumdente-Team:

Was ist der Unterschied zwischen ApaCare Zahnlack und Cumdente Etch & Bond?

Bei **Cumdente Etch & Bond** handelt es sich um ein selbstätzendes, licht- und selbsthärtendes Schmelz- und Dentinadhäsiv. Es ist kompatibel zu allen gängigen licht- und selbsthärtenden bzw. dualen Kompositen, Zementen und Kompomeren. Etch & Bond führt zu einem adhäsiven Wundverband und reduziert Sensibilitäten.

Wenn Cumdente Etch & Bond z. B. zur Desensibilisierung von freiliegenden Dentinoberflächen (z. B. an freiliegenden zervikalen Flächen) eingesetzt wird, wird eine Versiegelung der Dentintubulis erreicht. Das Schmerzempfinden lässt sofort nach. Eine Remineralisation im Sinne einer Mineraleinlagerung/-austausch der unter der Bondingschicht liegenden Dentinoberfläche findet allerdings nicht statt.

Bei **ApaCare Zahnlack** handelt es sich um einen mineralisierenden Zahnlack auf Schellack-Basis. Dieser enthält 20 % medizinisches Hydroxylapatit. ApaCare Zahnlack kann bei empfindlichen Zahnhälsen und zur Remineralisation von Initialkaries eingesetzt werden.

Wenn ApaCare Zahnlack zur Desensibilisierung eingesetzt wird, kommt es nach dem Auftrag und der Trocknung des Lackes zu einer Wasseraufnahme und Mineralanreicherung aus dem Speichel. Der Schellack quillt infolgedessen auf und gibt kontinuierlich die darin eingelagerten Hydroxylapatitminerale an die Zahnoberfläche ab. Das Schmerzempfinden lässt auch hier sofort nach dem Auftrag nach. Der Schellack löst sich nach 1-2 Tagen wieder ab und hinterlässt eine mit Hydroxylapatit versiegelte Dentinoberfläche, die auch dem Wiederauftreten von Sensibilitäten entgegenwirkt.

Ja, ich möchte ab sofort regelmäßig die »Frage des Monats« von Cumdente kostenlos an die folgende E-Mail Adresse erhalten:

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Rückfax an die +49 7071 9755722

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>
Mit besten Grüßen aus Tübingen

Ihr Prof. Dr. Rainer Hahn

Cumdente.
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21
Fax +49 70 71 975 57 22
info@cumdente.de
www.cumdente.com