

Eine Information zur Photo-aktivierten Therapie (PACT®)
von Zahn-, Mund-, Kiefer- und Implantatentzündungen.

Überreicht von Ihrem Zahnarzt:

Praxisstempel

9000039/0150

Cumdente.
dental concepts

Cumdente GmbH
72076 Tübingen, Germany
Fon +49 70 71 9 75 57 21
www.cumdente.com

Weitere Informationen zur Photo-aktivierten
Therapie erhalten Sie auch unter:
[www.cumdente.com/produkte/
photo-aktivierte-therapie-pa.html](http://www.cumdente.com/produkte/photo-aktivierte-therapie-pa.html)





PACT[®]300

Photo-aktivierte Therapie



**Heilt Zahn-,
Mund-, Kiefer-
und Implantat-
entzündungen.**

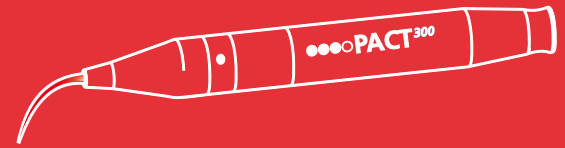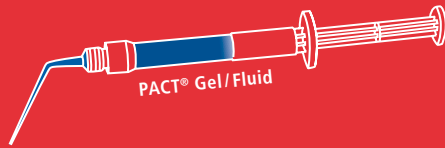

Information zur Photo-aktivierten Therapie (PACT®)

PACT® ist eine Abkürzung und ein wissenschaftlicher Begriff für die Photodynamische Antimikrobielle Therapie. Mit dieser Methode können Bakterien sehr effektiv und ohne Schmerzen oder Nebenwirkungen abgetötet werden.

Schritt 1 (60 Sekunden):

Der Blaufarbstoff wird als Gel oder Fluid auf die entzündeten Bereiche aufgetragen. Bakterien und Pilze nehmen diesen schnell auf, Körperzellen werden geschont. So markieren sich die entzündungsverursachenden Keime selektiv für das PACT®-Laserlicht.

Schritt 2 (20 Sekunden):

Die mit dem blauen Farbstoff angefärbten Bakterien werden durch Bestrahlung mit PACT®-Laserlicht sehr wirksam abgetötet. Die Abtötungsrate liegt bei 99,99 %, Resistenzen gibt es nicht. Die PACT® Wirkung geht tief in das Gewebe hinein, ist völlig schmerzfrei und schont die menschlichen Zellen. PACT® kann den Einsatz von Antibiotika ersetzen. Die Blaufärbung verschwindet nach wenigen Minuten von ganz alleine.

Die PACT® Heilung: Gesundes Gewebe kann wachsen.

Nachdem die Bakterien abgetötet wurden, kann der Körper die Entzündung ausheilen. Schleimhaut und Zahnfleisch können gesund nachwachsen. Die Behandlung kann jederzeit nebenwirkungsfrei wiederholt werden.

Photo-aktivierte Therapie (PACT®)

(Betreffendes bitte ankreuzen)

- PACT® Parodontitis-Therapie**
Schmerzfreie Alternative zur Antibiose und Operation. Bei aggressiver und chronischer Parodontitis. Verbessert die Regeneration.
- PACT® Therapie von Implantatentzündungen**
Führt rasch zur Entzündungsfreiheit und schont die empfindlichen Implantatoberflächen.
- PACT® Wurzelkanal-»Sterilisation«**
Eliminiert Problemkeime aus dem Wurzelkanalsystem. Verbessert den Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung.
- PACT® Karies-Therapie**
Minimiert das zahnärztliche Bohren. Wirkt bis tief ins poröse Zahnbein. Schont die Zahnnerven.
- PACT® Knochen- und Weichgewebs-Therapie**
Wirkt schnell und schmerzfrei, beschleunigt die Heilung, hilft Operationen zu vermeiden.

